

NOTIFICARE URGENTĂ PRIVIND SIGURANȚĂ ACTUALIZARE



Data trimiterii scrisorii

Nr. ref. GE HealthCare 85480-2B

Către: Directorul/Managerul secției de radiologie
 Directorul/Managerul secției de cardiologie
 Managerul de risc/Administratorul spitalului
 Șeful secției de radiologie
 Șeful secției de cardiologie
 Administratorul PACS
 Directorul departamentului IT
 Șeful departamentului de inginerie biomedicală
 Șeful departamentului de informatică imagistică

SUBIECT: **Actualizare a Comunicării anterioare privind corecția de urgență a dispozitivelor medicale (atașată) referitoare la linia de produse Centricity Radiology RA600 (RA600) și Centricity Cardiology CA1000 (CA1000).**

Stimate Client,

Ca urmare a Notificării urgente privind siguranță de la GE HealthCare anexate, nr. ref. 85480-2, vă oferim o anexă la manualul de instalare care conține instrucțiuni pentru schimbarea parolelor.

Există doi pași pentru a contracara această problemă potențială:

Pasul 1: Vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos pentru a descărca anexa la manualul de instalare.

1. Accesați pagina GE Healthcare Customer Documentation Portal (Portalul de documentație pentru clienții GE Healthcare) la adresa:
<https://www.gehealthcare.com/support/manuals>
2. În câmpul de căutare „Enter Product Info” (Introduceți informațiile despre produs), introduceți Codul componentei: **5981182**
3. Apăsați Enter sau faceți clic pe pictograma Lupă din câmpul de căutare pentru a iniția căutarea. Se va afișa „Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum (Anexa la Manualul de instalare pentru Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000) - <limba implicită>” ca rezultat al căutării.
 - (a) Versiunile traduse sunt disponibile prin intermediul meniului derulant pentru selectarea limbii, care se află în extrema dreaptă a câmpului de căutare.
4. Faceți clic pe butonul Download (Descărcare)  care se află la dreapta față de „Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum (Anexa la Manualul de instalare pentru Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000) - <limba>”.
5. Faceți clic pe Accept (Acceptare) pentru a confirma restricțiile privind drepturile de autor. Se va afișa documentul „Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum (Anexa la Manualul de instalare pentru Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000) - <limba>”.
6. Faceți clic fie pe pictograma Salvare, fie pe pictograma Descărcare, în funcție de browserul pe care îl folosiți.

7. Salvați „Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000 Installation Manual Addendum (Anexa la Manualul de instalare pentru Centricity Radiology RA600 Centricity Cardiology CA1000) - <limba >” pe sistemul local, precum și pe o locație centrală adecvată, disponibilă pentru toți utilizatorii.

Pasul 2: Urmăriți instrucțiunile din anexă referitoare la schimbarea parolelor.

Vă rugăm să completați și să returnați formularul anexat de confirmare a Notificării privind siguranță.

Date de contact Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind această notificare, contactați GE HealthCare Service sau reprezentantul dvs. de service local.

Vă asigurăm că menținerea unui nivel ridicat de siguranță și calitate este cea mai mare prioritate a noastră. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de contact de mai sus.

Cu respect,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare

Scott Kelley
Chief Medical Safety Officer
GE HealthCare

**CONFIRMAREA NOTIFICĂRII PRIVIND SIGURANȚĂ
ESTE NECESAR RĂSPUNSUL - FORMULAR CU ACȚIUNILE EFECTUATE**

Vă rugăm fie să completați acest formular și să îl returnați la GE HealthCare imediat după primire, în termen de 30 de zile de la primire, fie să completați formularul de răspuns online folosind linkul din partea de jos a paginii. În acest mod se va confirma primirea și înțelegerea Notificării privind siguranță.

Numele unității: _____

Adresa: Strada: _____

Orașul/Statul/Codul poștal/Țara: _____

Adresa de e-mail a Clientului: _____

Numărul de telefon al Clientului: _____

Prin semnarea acestui formular, confirmăm că am primit și am înțeles Notificarea privind siguranță anexată, că am descărcat anexa și am urmat instrucțiunile din aceasta pentru a schimba parolele, în conformitate cu Notificarea respectivă.

Vă rugăm să indicați numele persoanei responsabile care a completat acest formular.

Semnătura: _____

Numele în clar: _____

Funcția/Profesia: _____

Data (ZZ/LL/AAAA): _____

Vă rugăm să returnați formularul completat, scanat sau fotografiat, la adresa de e-mail Recall.85480_2@gehealthcare.com sau să completați formularul de răspuns online.



Codul QR pentru e-mail



Codul QR pentru formularul de
răspuns online