

NOTIFICARE URGENTĂ PRIVIND SIGURANȚĂ - ACTUALIZARE



Data trimiterii scrisorii

GE HealthCare Nr. ref. 34136-TRM

Către: Administratorul medical / Managerul de risc
Asistent Medical Șef
Director tehnică biomedicală

SUBIECT: **Actualizare la comunicarea GE HealthCare privind aparatele de anestezie Aisys CS², Avance CS², Avance CS² Pro, Aisys, Avance, Amingo, Aespire 100, Aespire View, Aespire 7900 și Aespire 7100 echipate cu ieșire de gaz comună auxiliară (Auxiliary Common Gas Outlet - ACGO)**

Stimate Client,

Ca urmare a Notificării urgente privind siguranță de la GE HealthCare anexate (Nr. ref. 34136), vă oferim manuale tehnice de referință (Technical Reference Manuals - TRM) care includ cerințele pentru înlocuirea capacelor pentru portul AGCO și pentru comutatorul ACGO.

Când efectuați orice întreținere planificată a unui sistem de anestezie GE HealthCare, utilizați lista de verificări pentru întreținerea planificată și instrucțiunile furnizate în TRM. Pentru a accesa TRM pentru sistemele de anestezie GE HealthCare, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a descărca cea mai recentă versiune a TRM. Dacă aveți dificultăți în accesarea documentelor sau dacă preferați un exemplar tipărit, contactați GE HealthCare pentru asistență.

Instrucțiuni:

1. Accesați Customer Documentation Portal (Portalul cu documentația pentru clienți) GE HealthCare utilizând linkul sau codul QR de mai jos.

Portalul cu documentația GE HealthCare:

<https://www.gehealthcare.com/support/manuals>



2. Puteți găsi numărul documentului TRM corespunzător în tabelul de mai jos.

Numerele documentelor după produs:

Produs	TRM
Aespire 7100/Aespire 100	M1110140
Aespire 7900	1009-0541-000
Aespire View	M1170027
Aisys	M1046983
Aisys CS ²	2069137-001
Amingo	1009-0357-000
Avance	1009-0357-000
Avance CS ² /CS ² Pro	M1222131

3. Introduceți numărul documentului TRM în bara de căutare de pe Portalul cu documentația pentru clienți și faceți clic pe butonul de căutare.
4. Faceți clic pe butonul de descărcare pentru a începe descărcarea documentului și acceptați informațiile privind drepturile de autor.

Dacă nu ați completat și nu ați returnat deja formularul de luare la cunoștință inclus în Notificarea urgentă privind siguranța de la GE HealthCare anexată, vă rugăm să îl completați și să îl returnați la FMI34136.ACGO@gehealthcare.com.

Ne cerem scuze pentru orice neplăcere cauzată de această acțiune și vă mulțumim pentru cooperarea și sprijinul dvs. constant.

Cu respect,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE HealthCare