

NOTIFICARE URGENTĂ PRIVIND SIGURANȚĂ ACTUALIZARE



Data trimiterii scrisorii

GE HealthCare Referință# 32097-2

Către: Director de Inginerie Biomedicală
Director de Neonatologie/L și D/Manager de asistenți medicali
Manager de Risc/Administrator Spital

RE: **Actualizare la comunicarea GE HealthCare: Ușă încălzitor pentru anumite dispozitive Giraffe OmniBed și Giraffe OmniBed Carestation**

Problemă de siguranță

GE HealthCare a comunicat anterior o Notificare Urgentă de Siguranță referitoare la ușile încălzitorului pentru anumite dispozitive Giraffe OmniBed și Giraffe OmniBed Carestation (Referință GE HealthCare # 32097). Scopul acestei scrisori este de a furniza informații actualizate privind Notificarea Urgentă de Siguranță originală.

Am identificat recent o situație rară în care alarma de prioritate înaltă nu se activează atunci când ușile sunt slăbite, dar ușile încă se pot deschide și închide, în timp ce capacul se ridică sau coboară.

Nu au fost raportate accidentări ca urmare a acestei probleme potențiale.

Acțiuni ce trebuie întreprinse de Client/ Utilizator

Vă rugăm să consultați Notificarea Urgentă de Siguranță originala atașată pentru acțiunile ce trebuie întreprinse de Client/Utilizator.

Pe lângă aceste acțiuni, nu vă bazați pe alarme pentru a identifica o ușă posibil slăbită. Dacă întâlniți o ușă slăbită, indiferent dacă auziți o alarmă, scoateți sistemul din uz clinic și contactați reprezentantul dumneavoastră GE HealthCare.

Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de ajutor pentru a urma instrucțiunile, vă rugăm să contactați reprezentantul dumneavoastră GE HealthCare.

Asigurați-vă că toți utilizatorii potențiali din facilitatea dumneavoastră sunt informați despre comunicarea originală și aceste informații actualizate.

Vă asigurăm că menținerea unui nivel înalt de siguranță și calitate este prioritatea noastră cea mai înaltă. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați conform informațiilor de contact de mai sus.

Cu sinceritate,

Laila Gurney
Chief Quality & Regulatory Officer
GE Healthcare

Scott Kelley
Chief Medical Safety Officer
GE Healthcare