

Drägerwerk AG & Co. KGaA, 23542 Lubeck, Germania

Pentru clienții noștri cu stații  
de lucru Dräger Atlan

August 2025

## Notificare importantă privind siguranța!

**Posibila defectare a ventilației automate din cauza pătrunderii  
unor impurități în sistemul electronic al motorului**

**Acest lucru afectează numai stațiile de lucru pentru anestezie  
Atlan cu numere de serie din lista anexată.  
Alte aparate de anestezie NU sunt afectate!**

Stimate domn/Stimată doamnă,

În cursul supravegherii pieței noastre mondiale, am luat cunoștință de cazuri în care stațiile de anestezie Atlan fie au indicat o defecțiune a ventilatorului cu piston înainte de utilizare, fie au suferit o defecțiune a ventilației mecanice în timpul utilizării. Până în prezent, nu au fost raportate cazuri de vătămare a pacienților.

Investigațiile noastre au arătat că aceste cazuri sunt provocate de impurități (praf) care au pătruns într-o anumită perioadă de timp în cadrul procesului de fabricație a codificatorului motorului ventilatorului. Conform evidențelor noastre, ați primit de la noi unul sau mai multe dispozitive din gama de numere de serie afectate.

**Dacă eroarea apare înainte de utilizare, de exemplu, în modul de standby sau de testare a sistemului, ventilația mecanică nu poate fi pornită. Dacă eroarea apare în timpul unei proceduri, ventilația mecanică poate eșua, iar dispozitivul alertează utilizatorul prin afișarea mesajului „Defecțiune ventilator!!!”. Ventilația manuală sau respirația spontană rămân posibile în ambele cazuri. Este posibil să fie necesară ventilarea manuală a pacientului pentru a preveni rănirea acestuia. În cazul unei alarme de eșec al ventilației, Atlan continuă să asigure modul de ventilație Man/Spon, alimentarea cu gaz proaspăt și medicamente și toate funcțiile de monitorizare fără restricții.**

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53-55  
23558 Lubeck, Germania  
Adresă poștală:  
23542 Lubeck, Germania  
Tel. +49 451 882-0  
Fax +49 451 882-2080  
info@draeger.com  
www.draeger.com

Detalii bancare:  
Commerzbank AG, Lubeck  
IBAN: DE95 2304 0022 0014 6795 00  
Cod Swift: COBA DE FF 230

Sparkasse zu Lubeck  
IBAN: DE15 2305 0101 0001 0711 17  
Cod Swift: NOLADE21SPL

Sediul social: Lubeck  
Registrul Comerțului Lubeck:  
Tribunalul local din Lubeck HRB 7903 HL  
Partener general:  
Drägerwerk Verwaltungs AG  
Sediul social: Lubeck  
Registrul Comerțului  
Tribunalul local din Lubeck HRB 7395 HL  
UID-Nr. DE135082211

Președintele Consiliului de Supraveghere  
pentru Drägerwerk AG & Co. KGaA  
și Drägerwerk Verwaltungs AG:  
Stefan Lauer

Consiliul de Administrație:  
Stefan Dräger (Președinte)  
Stefanie Hirsch  
Rainer Klug  
Gert-Hartwig Lescow  
Dr. Reiner Piske  
Anton Schrofner

Service-ul nostru Dräger vă va contacta și va stabili o întâlnire pentru înlocuirea gratuită a motorului.

**Până atunci, vă rugăm să continuați să vă folosiți dispozitivele cu grija obișnuită, numai sub supraveghere permanentă, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare Atlan. Dacă ventilația mecanică eșuează, utilizați modul de ventilație Man/Spon pentru a ventila manual pacientul, după caz.**

Dacă este necesar, puteți reduce prioritatea alarmei „Defecțiune ventilator!!!” cu „RESETARE ALARMĂ”.

Regretăm eventualele inconveniente care ar putea fi provocate din această cauză.

Vă rugăm să vă asigurați că toți utilizatorii Dräger Atlan și alte persoane din cadrul organizației dumneavoastră sunt informate cu privire la această Notificare importantă privind siguranța. Vă rugăm să completați și să returnați formularul de răspuns anexat pentru a confirma acest lucru.

Dacă ați pus produsele la dispoziția unor terți, vă rugăm să le transmiteți o copie a acestei notificări importante privind siguranța.

Vă rugăm să păstrați această Notificare importantă privind siguranța cel puțin până la înlocuirea motorului. Autoritățile responsabile au fost informate cu privire la această acțiune.

#### **Identificarea dispozitivelor medicale afectate:**

Conform înregistrărilor noastre, ați primit cel puțin o stație de lucru de anestezie Atlan fabricată de Drägerwerk AG & Co. KGaA (având număr unic european de înregistrare: DE- MF-000005329), care ar putea fi afectată de această problemă.

#### **Contact:**

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să contactați reprezentantul local Dräger.

Regretăm orice inconvenient pe care acest lucru îl poate provoca.

Cu stimă,

*Semnătură indescifrabilă*

Makoto Onda

Management de produs

Terapia unității de afaceri  
reglementare

*Semnătură indescifrabilă*

Sonja Hillmer

Supraveghere ulterioară a pieței

Departamentul de calitate și afaceri de

## Anexă la Avizul important privind siguranța - lista dispozitivelor afectate

| Dispozitiv    | Număr piesă | Identificator unic de dispozitiv de bază |
|---------------|-------------|------------------------------------------|
| Atlan A100    | 8621100     | 040486751301035FK19X030W4                |
| Atlan A100 XL | 8621200     |                                          |
| Atlan A300    | 8621300     | 040486751301035FK19ZOOOW9                |
| Atlan A300 XL | 8621400     |                                          |
| Atlan A350    | 8621500     | 040486751301035FK19T010V2                |
| Atlan A350 XL | 8621600     |                                          |

### IUD-uri pentru Atlan A100

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (01)4048675594963(11)250204(21)ASUA-0333(93)8621100-08 | (01)4048675594963(11)250404(21)ASUC-0335(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250204(21)ASUA-0334(93)8621100-08 | (01)4048675594963(11)250404(21)ASUC-0336(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250204(21)ASUA-0336(93)8621100-08 | (01)4048675594963(11)250411(21)ASUD-0045(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250210(21)ASUA-0457(93)8621100-08 | (01)4048675594963(11)250422(21)ASUD-0148(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250220(21)ASUB-0166(93)8621100-08 | (01)4048675594963(11)250425(21)ASUD-0218(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250320(21)ASUC-0002(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250425(21)ASUD-0229(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250320(21)ASUC-0003(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250425(21)ASUD-0230(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250401(21)ASUC-0260(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250425(21)ASUD-0231(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250401(21)ASUC-0261(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250428(21)ASUD-0240(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250402(21)ASUC-0280(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250428(21)ASUD-0241(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250402(21)ASUC-0281(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250428(21)ASUD-0242(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250402(21)ASUC-0282(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250428(21)ASUD-0243(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250404(21)ASUC-0330(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250429(21)ASUD-0255(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250404(21)ASUC-0333(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250429(21)ASUD-0256(93)8621100-09 |
| (01)4048675594963(11)250404(21)ASUC-0334(93)8621100-09 | (01)4048675594963(11)250429(21)ASUD-0257(93)8621100-09 |

### IUD-uri pentru Atlan A100 XL

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (01)4048675594956(11)250214(21)ASUB-0079(93)8621200-08 | (01)4048675594956(11)250401(21)ASUC-0258(93)8621200-09 |
| (01)4048675594956(11)250214(21)ASUB-0080(93)8621200-08 | (01)4048675594956(11)250401(21)ASUC-0259(93)8621200-09 |
| (01)4048675594956(11)250214(21)ASUB-0084(93)8621200-08 | (01)4048675594956(11)250417(21)ASUD-0139(93)8621200-09 |
| (01)4048675594956(11)250214(21)ASUB-0085(93)8621200-08 | (01)4048675594956(11)250422(21)ASUD-0161(93)8621200-09 |
| (01)4048675594956(11)250214(21)ASUB-0086(93)8621200-08 | (01)4048675594956(11)250422(21)ASUD-0162(93)8621200-09 |
| (01)4048675594956(11)250214(21)ASUB-0087(93)8621200-08 | (01)4048675594956(11)250422(21)ASUD-0163(93)8621200-09 |
| (01)4048675594956(11)250225(21)ASUB-0212(93)8621200-08 |                                                        |

### IUD-uri pentru Atlan A300

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (01)04048675556343(11)250207(21)ASUA-0431(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250407(21)ASUC-0374(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250210(21)ASUA-0462(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250407(21)ASUC-0375(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250210(21)ASUA-0463(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250408(21)ASUC-0411(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250210(21)ASUA-0464(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250408(21)ASUC-0412(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250210(21)ASUA-0467(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250408(21)ASUC-0413(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250211(21)ASUA-0494(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250408(21)ASUC-0414(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250212(21)ASUB-0019(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250408(21)ASUC-0415(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250213(21)ASUB-0049(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250410(21)ASUD-0040(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250213(21)ASUB-0050(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250417(21)ASUD-0124(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250213(21)ASUB-0051(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250417(21)ASUD-0125(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250213(21)ASUB-0055(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250417(21)ASUD-0132(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250213(21)ASUB-0056(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250422(21)ASUD-0151(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250214(21)ASUB-0057(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250422(21)ASUD-0152(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250214(21)ASUB-0058(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250422(21)ASUD-0153(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250214(21)ASUB-0059(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250422(21)ASUD-0154(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250214(21)ASUB-0071(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250422(21)ASUD-0155(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250214(21)ASUB-0072(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250422(21)ASUD-0156(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250217(21)ASUB-0089(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250423(21)ASUD-0169(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250217(21)ASUB-0090(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250423(21)ASUD-0170(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250217(21)ASUB-0091(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250423(21)ASUD-0171(93)8621300-20 |

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (01)04048675556343(11)250218(21)ASUB-0125(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250423(21)ASUD-0172(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250218(21)ASUB-0126(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250425(21)ASUD-0213(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250218(21)ASUB-0127(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250425(21)ASUD-0214(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250224(21)ASUB-0180(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250425(21)ASUD-0215(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250224(21)ASUB-0181(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250425(21)ASUD-0216(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250224(21)ASUB-0182(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250425(21)ASUD-0217(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250226(21)ASUB-0246(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250428(21)ASUD-0232(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250226(21)ASUB-0247(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250428(21)ASUD-0233(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250226(21)ASUB-0248(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250428(21)ASUD-0234(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250226(21)ASUB-0249(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250428(21)ASUD-0235(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250227(21)ASUB-0289(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250428(21)ASUD-0236(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250227(21)ASUB-0290(93)8621300-19 | (01)04048675556343(11)250428(21)ASUD-0237(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250401(21)ASUC-0270(93)8621300-20 | (01)04048675556343(11)250429(21)ASUD-0264(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250401(21)ASUC-0271(93)8621300-20 | (01)04048675556343(11)250429(21)ASUD-0265(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250403(21)ASUC-0325(93)8621300-20 | (01)04048675556343(11)250429(21)ASUD-0266(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250403(21)ASUC-0326(93)8621300-20 | (01)04048675556343(11)250430(21)ASUD-0288(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250403(21)ASUC-0327(93)8621300-20 | (01)04048675556343(11)250430(21)ASUD-0289(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250404(21)ASUC-0328(93)8621300-20 | (01)04048675556343(11)250430(21)ASUD-0290(93)8621300-20 |
| (01)04048675556343(11)250404(21)ASUC-0329(93)8621300-20 | (01)04048675556343(11)250430(21)ASUD-0291(93)8621300-20 |

## IUD-uri pentru Atlan A300 XL

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (01)4048675556169(11)250203(21)ASUA-0307(93)8621400-19 | (01)4048675556169(11)250410(21)ASUD-0039(93)8621400-20 |
| (01)4048675556169(11)250207(21)ASUA-0438(93)8621400-19 | (01)4048675556169(11)250417(21)ASUD-0123(93)8621400-20 |

## IUDuri pentru Atlan A350

[illegible]

Pagina 5 / 13

[illegible]

Pagina 7 / 13

Pagina 8 / 13

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (01)4048675556176(11)250327(21)ASUC-0203(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250429(21)ASUD-0259(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250327(21)ASUC-0204(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250429(21)ASUD-0260(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250327(21)ASUC-0205(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250429(21)ASUD-0261(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250327(21)ASUC-0206(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250429(21)ASUD-0262(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250327(21)ASUC-0207(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250429(21)ASUD-0263(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250327(21)ASUC-0208(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250429(21)ASUD-0267(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250327(21)ASUC-0209(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250430(21)ASUD-0273(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250327(21)ASUC-0210(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250430(21)ASUD-0274(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250328(21)ASUC-0218(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250430(21)ASUD-0281(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250328(21)ASUC-0219(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250430(21)ASUD-0282(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250328(21)ASUC-0220(93)8621500-20 | (01)4048675556176(11)250430(21)ASUD-0283(93)8621500-20 |
| (01)4048675556176(11)250328(21)ASUC-0221(93)8621500-20 |                                                        |

## IUD-uri pentru Atlan A350 XL

[illegible]

Pagina 10 / 13

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| (01)4048675556183(11)250326(21)ASUC-0175(93)8621600-20 | (01)4048675556183(11)250502(21)ASUD-0294(93)8621600-20 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

**Ansamblu kit ventilator**

| Luna de fabricație | Numere de serie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-2024            | ASTM-...        | ...-1468, ...-1469, ...-1470, ...-1473, ...-1474, ...-1475, ...-1476, ...-1477, ...-<br>1478, ...-1479, ...-1480, ...-1481, ...-1482, ...-1485, ...-1488, ...-1490, ...-<br>1491, ...-1492, ...-1493, ...-1494, ...-1495, ...-1498, ...-1501, ...-1502, ...-<br>1503,<br>...-1508, ...-1509, ...-1510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 01-2025            | ASUA-...        | ...-0384, ...-0389, ...-0538, ...-0539, ...-0540, ...-0541, ...-0542, ...-<br>0543, ...-0544, ...-0545, ...-0546, ...-0547, ...-0548, ...-0549, ...-0550,<br>...-0551, ...-0552, ...-0554, ...-0555, ...-0557, ...-0562, ...-0584, ...-<br>0595, ...-0596, ...-0597, ...-0598, ...-0599, ...-0600, ...-0601, ...-0602,<br>...-0603, ...-0604, ...-0605, ...-0606, ...-0607, ...-0608, ...-0609, ...-<br>0610, ...-0611, ...-0613, ...-0614, ...-0627, ...-0629, ...-0630, ...-0631, ...-<br>0632, ...-0633, ...-0638, ...-0640, ...-0641, ...-0642, ...-0646, ...-0649,<br>...-0653, ...-0694, ...-0708, ...-0712, ...-0713, ...-0714, ...-0715, ...-0716,<br>...-0717, ...-0718, ...-0719, ...-0720, ...-0721, ...-0722, ...-0723, ...-0724,<br>...-0725, ...-0726, ...-0727, ...-0728, ...-0729, ...-0730, ...-0731, ...-0732,<br>...-0733, ...-0734, ...-0735, ...-0736, ...-0737, ...-0738, ...-0739, ...-0740,<br>...-0741, ...-0742, ...-0743, ...-0744, ...-0745, ...-0746, ...-0747, ...-0748,<br>...-0749, ...-0750, ...-0751, ...-0752, ...-0753, ...-0754, ...-0755, ...-0756,<br>...-0757, ...-0759, ...-0761 |
| 02-2025            | ASUB-...        | ...-0013, ...-0014, ...-0015, ...-0016, ...-0017, ...-0019, ...-0020, ...-0021,<br>...-0022, ...-0023, ...-0024, ...-0025, ...-0026, ...-0028, ...-0030, ...-<br>0031, ...-0032, ...-0033, ...-0034, ...-0037, ...-0038, ...-0039, ...-0040,<br>...-0042, ...-0043, ...-0044, ...-0045, ...-0046, ...-0048, ...-0049, ...-<br>0051, ...-0052, ...-0053, ...-0054, ...-0055, ...-0056, ...-0058, ...-0059,<br>...-0060, ...-0061, ...-0062, ...-0063, ...-0065, ...-0066, ...-0068, ...-<br>0069, ...-0071, ...-0077, ...-0080, ...-0081, ...-0082, ...-0087, ...-0088,<br>...-0089, ...-0090, ...-0094, ...-0095, ...-0096, ...-0097, ...-0098, ...-<br>0103, ...-0106, ...-0107, ...-0108, ...-0109, ...-0110, ...-0111, ...-0112, ...-<br>0114,<br>...-0117, ...-0118, ...-0119, ...-0120, ...-0121, ...-0123, ...-0124, ...-0125,<br>...-<br>0126, ...-0128, ...-0129, ...-0130, ...-0132, ...-0133, ...-0135, ...-0136, ...-<br>0138, ...-0141, ...-0142, ...-0144, ...-0149, ...-0150, ...-0152, ...-0154, ...-<br>0156, ...-0157, ...-0158, ...-0159, ...-0160, ...-0161                                            |
| 03-2025            | ASUC-...        | ...-0246, ...-0247, ...-0248, ...-0249, ...-0250, ...-0251, ...-0252, ...-0253,<br>...-0254, ...-0255, ...-0256, ...-0257, ...-0258, ...-0259, ...-0260, ...-0261,<br>...-0262, ...-0263, ...-0264, ...-0265, ...-0266, ...-0267, ...-0268, ...-<br>0269, ...-0270, ...-0271, ...-0272, ...-0273, ...-0274, ...-0275, ...-0276, ...-<br>0277, ...-0278, ...-0279, ...-0280, ...-0281, ...-0282, ...-0283, ...-0284,<br>...-0285, ...-0286, ...-0287, ...-0288, ...-0289, ...-0290, ...-0291, ...-<br>0292, ...-0293, ...-0294, ...-0295, ...-0296, ...-0297, ...-0298, ...-0299,<br>...-0300, ...-0301, ...-0302, ...-0303, ...-0304, ...-0305, ...-0306, ...-<br>0307, ...-0308, ...-0309, ...-0310, ...-0311, ...-0312, ...-0313, ...-0314, ...-<br>0315, ...-0316, ...-0317, ...-0318, ...-0319, ...-0320, ...-0321, ...-0322, ...-<br>0323, ...-0324, ...-0325, ...-0326, ...-0327, ...-0328, ...-0329, ...-0330,                                                                                                                                                                                                     |

|         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | ...-0331, ...-0332, ...-0333, ...-0334, ...-0335, ...-0336, ...-0337, ...-0338, ...-0339, ...-0340, ...-0341,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 04-2025 | ASUD-... | ...-0001, ...-0002, ...-0004, ...-0005, ...-0007, ...-0008, ...-0011, ...-0012, ...-0013, ...-0014, ...-0016, ...-0017, ...-0020, ...-0021, ...-0023, ...-0024, ...-0025, ...-0026, ...-0027, ...-0028, ...-0029, ...-0030, ...-0031, ...-0032, ...-0033, ...-0034, ...-0035, ...-0036, ...-0037, ...-0038, ...-0039, ...-0040, ...-0041, ...-0042, ...-0043, ...-0044, ...-0045, ...-0046, ...-0047, ...-0048, ...-0049, ...-0050, ...-0051, ...-0052, ...-0053, ...-0054, ...-0055, ...-0056, ...-0057, ...-0058, ...-0059, ...-0060, ...-0061, ...-0062, ...-0063, ...-0064, ...-0065, ...-0066, ...-0067, ...-0068, ...-0069, ...-0070, ...-0071, ...-0072, ...-0073, ...-0074, ...-0075, ...-0076, ...-0077, ...-0078, ...-0079, ...-0080, ...-0081, ...-0082, ...-0084, ...-0085, ...-0086, ...-0087, ...-0088, ...-0089, ...-0090, ...-0091, ...-0092, ...-0093, ...-0094, ...-0095, ...-0096, ...-0097, ...-0098, ...-0099, ...-0100 |

## Fișă de răspuns

**Vă rugăm să trimiteți acest formular prin fax sau e-mail  
reprezentantului dumneavoastră Dräger!**

|                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>D<br/>R<br/>Ä<br/>G<br/>E<br/>R</b> | Către:                                                                                                                                                                       | < A se completa de către filialele/operatorii relevanți >                              |      |
|                                        | Departament:                                                                                                                                                                 |                                                                                        |      |
|                                        | Reprezentant                                                                                                                                                                 |                                                                                        |      |
|                                        | Dräger                                                                                                                                                                       |                                                                                        |      |
|                                        | Fax:                                                                                                                                                                         |                                                                                        |      |
|                                        | Telefon:                                                                                                                                                                     |                                                                                        |      |
|                                        | E-mail:                                                                                                                                                                      |                                                                                        |      |
|                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |      |
| Re:                                    |                                                                                                                                                                              | <b>Notificare importantă privind siguranța cu privire la Dräger Atlan, august 2025</b> |      |
| (Vă rugăm să completați)               |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |      |
| <b>D<br/>A<br/>T<br/>E</b>             | Spital:                                                                                                                                                                      |                                                                                        |      |
|                                        | Numele clientului:                                                                                                                                                           |                                                                                        |      |
|                                        | Telefon:                                                                                                                                                                     |                                                                                        | Fax: |
|                                        | E-mail:                                                                                                                                                                      |                                                                                        |      |
|                                        | Adresa:                                                                                                                                                                      |                                                                                        |      |
|                                        | Adresă 2:                                                                                                                                                                    |                                                                                        |      |
| <b>C<br/>L<br/>I<br/>E<br/>N<br/>T</b> |                                                                                                                                                                              | Țara:                                                                                  |      |
|                                        | Oraș/localitate:                                                                                                                                                             |                                                                                        |      |
|                                        | <b>Cantitate de unități afectate:</b>                                                                                                                                        |                                                                                        |      |
|                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |      |
|                                        | <input type="checkbox"/> Confirmăm primirea avizului de siguranță și faptul că informațiile conținute în acesta au fost aduse la cunoștința tuturor utilizatorilor afectați. |                                                                                        |      |
|                                        |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |      |
| (Vă rugăm să completați și să semnați) |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |      |
| Titlu/poziție:                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |      |
| Nume:                                  |                                                                                                                                                                              | (Vă rugăm să scrieți cu majuscule)                                                     |      |
| Semnătură:                             |                                                                                                                                                                              | Data:                                                                                  |      |

Subsemnata, VERDES ELENA ALINA, traducator autorizat de Ministerul Justitiei cu nr. 24515/2008, certific exactitatea traducerii cu textul inscrisului original din limba engleza in limba romana.

Traducător / Traduttrice / Translator